



FICHA TÉCNICA		0802003.1
PARÂMETROS DA MÁSCARA HIGIENE DE 3 CAMADAS		
PRODUTO	Máscara facial de uso único	
MATERIAL	Não tecido de polipropileno, fixador nasal de plástico, elástico de poliéster e elastano	
	1ª CAMADA	PP não tecido, 25g/m2
	2ª CAMADA	Tecido não tecido de alta eficiência / densidade, 25g/m2
	3ª CAMADA	PP não tecido, 25g/m2
APLICAÇÃO E FINALIDADE DO PRODUTO	Para proteção contra inalação de patógenos e gotículas no ar	
EMBALAGEM	50pcs	
CAPACIDADE DE FILTRAÇÃO (BFE≥)	≥95%	
ESTERILIZAÇÃO	Não esterilizadas	
USO	1. Inserir os dedos nos elásticos e colocar a máscara sobre o nariz e a boca, com o clip nasal posicionado em cima; 2. Posicionar os elásticos à volta das orelhas e puxar as extremidades da máscara para expandir as dobras. 3. Pressionar o clip nasal para ajustar ao perfil do nariz.	
ARMAZENAMENTO	Armazenar em local bem ventilado com humidade relativa abaixo de 85%. Evitar altas temperaturas e exposição a chamas.	

